



Rua Alexandre Dumas, 1976
São Paulo, SP 04717-004
Tel: 0xx11 5185-9810
Fax: 0xx11 5185-9937
bd.com

MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO

BD Ultra-Fine Agulha para aplicação de insulina com caneta

320494 - BD Ultra-Fine Agulha Nano PentaPoint 0,23mm (32G) x 4mm (5/32")

320478 - BD Ultra-Fine Agulha Nano PentaPoint 0,23mm (32G) x 4mm (5/32")

320495 - BD Ultra-Fine Agulha Mini 0,25mm (31G) x 5mm (3/16")

320496 - BD Ultra-Fine Agulha Curta 0,25mm (31G) x 8mm (5/16")



Estéril. Esterilizado por Cobalto 60.

Agulha para aplicação de insulina com caneta.

Instruções de Uso:

- 1) Retire o lacre do produto. Conecte a agulha, rosqueando sua base à caneta de aplicação de insulina.
- 2) Registre a dosagem conforme prescrição médica. *
- 3) Retire o protetor externo da agulha, o protetor interno e aplique no subcutâneo.

*Cada caneta tem características próprias, leia o manual antes do uso.

Técnica de aplicação indicada:

4mm: injetar em ângulo reto, sem prega subcutânea

5mm: ângulo reto, sem prega subcutânea

8mm: ângulo de 45° ou 90° com prega subcutânea (após avaliação profissional)

Precauções e advertências:

- Proibido reprocessar. Produto de uso único. Descartar após o uso.
- Não tóxico, não pirogênico. Não é feito com látex de borracha natural.
- Remova a agulha da caneta após cada aplicação para prevenir a entrada de ar e saída de insulina.
- Jamais faça a aplicação por cima da roupa.
- Descarte a agulha em recipientes com paredes rígidas e inquebrável. Feche-o e identifique-o como material contaminado.
- Use somente se o lacre da agulha e o pacote estiverem intactos.
- A esterilidade é garantida até que o lacre da agulha seja aberto ou danificado.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças que não estejam sob supervisão.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE.

Armazenar em local seco e manter afastado da luz solar.

Compatível com*	
Lilly	Humalog® Pen, HumaPen® Ergo, HumaPen® Luxura, Humulin® Pen, KwikPen, Umuline™, Forteo®
Sanofi	ClikStar®, OptiClick®, OptiPen® Pro, OptiSet®, SoloStar®
Amylin/BMS/AstraZeneca	BYETTA® Pen
Novo Nordisk	FlexPen®, FlexTouch® Pen, Mixtard® 30 Novolet®, NovoPen®, Victoza® Pen



Rua Alexandre Dumas, 1976
São Paulo, SP 04717-004
Tel: 0xx11 5185-9810
Fax: 0xx11 5185-9937
bd.com

Owen Mumford	AutoPen®
Belin-Chemie	BerlinPen® areo
Probiomed	Gliject®

Alguns dos produtos acima podem não estar disponíveis em seu mercado.

Por favor, consulte o manual de instrução do fabricante quanto ao manuseio da caneta de insulina.

*Todas as outras marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Fabricante:

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive – Franklin Lakes, NJ 07417
Estados Unidos da América

Feito na Irlanda

Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 273 – Juiz de fora – MG
CNPJ: 21551379/0001-06

Resp. Téc.: Marcelo A. Lopes – CRF MG-13673

SAC: 0800 055 5654 ou cs_brasil@bd.com / **BD Curta Mais:** 0800 011 5097 ou
www.bd.com/brasil/curtamais ou atendimento@bdcurtamais.com.br

ANVISA/MS nº:10033430456



Rua Alexandre Dumas, 1976
São Paulo, SP 04717-004
Tel: 0xx11 5185-9810
Fax: 0xx11 5185-9937
bd.com

MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO

BD Ultra-Fine Agulha para aplicação de insulina com caneta

320489 - BD Ultra-Fine Agulha Nano PentaPoint EasyFlow 0,23mm (32G) x 4mm (5/32")

Estéril. Esterilizado por Cobalto 60.

Parede extrafina.

Agulha para aplicação de insulina com caneta.

Instruções de Uso:

- 4) Retire o lacre do produto. Conecte a agulha, rosqueando sua base à caneta de aplicação de insulina.
- 5) Registre a dosagem conforme prescrição médica.**
- 6) Retire o protetor externo da agulha, o protetor interno e aplique no subcutâneo.


**Cada caneta tem características próprias, leia o manual antes do uso.

Técnica de aplicação indicada:


4mm: injetar em ângulo reto, sem prega subcutânea*

*Crianças de 2 a 6 anos de idade e adultos magros podem necessitar de prega subcutânea.


Dicas para uma boa técnica de aplicação:

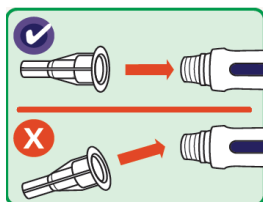

Faça o encaixe em ângulo reto com a caneta

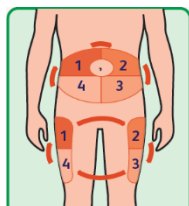

Faça o rodízio dos locais de aplicação para reduzir o risco de lipohipertrofia

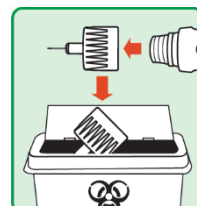

Utilize uma nova agulha por aplicação e descarte em coletores ou recipientes específicos após o uso

Precauções e advertências:

- Proibido reprocessar. Produto de uso único. Descartar após o uso.
- Não tóxico, não pirogênico. Não é feito com látex de borracha natural.
- Remova a agulha da caneta após cada aplicação para prevenir a entrada de ar e saída de insulina.
- Jamais faça a aplicação por cima da roupa.
- Descarte a agulha em recipientes com paredes rígidas e inquebrável. Feche-o e identifique-o como material contaminado
- Use somente se o lacre da agulha e o pacote estiverem intactos.
- A esterilidade é garantida até que o lacre da agulha seja aberto ou danificado.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças que não estejam sob supervisão.



PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE.

Armazenar em local seco e manter afastado da luz solar.

Descarte de forma adequada para evitar acidentes com perfurocortantes.

Compatível com*	
Lilly	Humalog® Pen, HumaPen® Ergo II, HumaPen® Luxura, Humulin® N Pen, Humalog® KwikPen, Umuline® NPH Pen, Forteo®, Basaglar, HumaPen SAVVIO, HumaPen® Memoir, Humatro Pen
Sanofi	ClikSTAR®, OptiClick®, OptiPen® Pro-2, Apidra SoloStar®, Lantus SoloStar®, Toujeo SoloStar®, Lantus TactiPen®, Lyxumia Pen
AstraZeneca	BYETTA® Pen, SymmlinPen™
Novo Nordisk	FlexPen®, FlexTouch Pen®, Mixtard® 30 Novolet®, NovoPen®, Victoza®
Own Mumford	AutoPen®
Belin-Chemie	BerliPen® Areo
Merck	Puregon Pen
Sandoz	Omnitrope 10 Pen

Alguns dos produtos acima podem não estar disponíveis em seu mercado.

Por favor, consulte o manual de instrução do fabricante quanto ao manuseio da caneta de insulina.

*Todas as outras marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Fabricante:

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive – Franklin Lakes, NJ 07417
Estados Unidos da América

Feito na Irlanda

Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 273 – Juiz de fora – MG
CNPJ: 21551379/0001-06

Resp. Téc.: Marcelo A. Lopes – CRF MG-13673

SAC: 0800 055 5654 ou cs_brasil@bd.com / **BD Curta Mais:** 0800 011 5097 ou www.bd.com/brasil/curtamais ou atendimento@bdcurtamais.com.br

ANVISA/MS nº:10033430456